

Como utilizar o respirador descartável.



1 Segure o respirador na palma da mão, com a espuma interna na direção da ponta dos dedos. As tiras elásticas devem ficar soltas para baixo.



2 Leve o respirador ao rosto apoiando no queixo e depois cubra a boca e o nariz. O clipe nasal deve estar na parte superior do respirador. Para os modelos 8212, 8214 e 8835, pré-ajuste os tirantes elásticos.



3 Puxe o elástico superior colocando-o bem no alto na parte de trás da cabeça, acima das orelhas.



4 Faça o mesmo com o elástico inferior, colocando-o na parte de trás do pescoço. Ajuste os elásticos para que não fiquem torcidos.



5 Com a ponta dos dedos de ambas as mãos, molde o grampo nasal (peça metálica) ao seu nariz. Para isso, empurre-o para dentro ao mover as pontas dos dedos para baixo sobre ambos os lados do respirador.



USO CORRETO



ATENÇÃO



Para garantir uma boa vedação, evite que os elásticos fiquem torcidos, e atente-se à posição dos elásticos: o superior deve ficar acima das orelhas, e o inferior abaixo das orelhas.